

Kurzeinweisung DeVilbiss iFill

PFLEGE

Oberflächen regelmäßig abwischen



Entnehmen Sie die Schaumstofffilter auf beiden Seiten des Geräts



Reinigen Sie beide Filter durch absaugen, ausklopfen oder auswaschen.



Setzen sie die Filter (**trocken**) zurück in die Halterungen auf beiden Seiten



Benutzung der iFill-Flasche:



O2-Brille anschließen



Stellen Sie die O2-Stufe entsprechend Weisung des Arztes ein



Atmen Sie durch die Nase

Aufstellung

Stellen Sie das Gerät an einen Ort der gut gelüftet ist.



~~Keine feuchten Räume~~



~~Nicht vor einer Heizung~~



Weitere wichtige Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung

Kurzeinweisung DeVilbiss iFill

Was gehört alles zum Gerät?



iFill / Flaschenfüllgerät



Sauerstoffflasche



Tragetasche



Stromkabel



Anleitung

Vorbereitung

Schritt 1

Stecken sie das Stromkabel in den dafür vorgesehenen Anschluss



Schritt 2

Schließen Sie das Gerät am Strom an (Keine Mehrfachsteckdose)



Schritt 3

Das Gerät ist nun bereit.



Inbetriebnahme

Setzen Sie die Flasche auf den Füllstutzen



Der Anschluss rastet ein, indem der Verriegelungsring nach oben schnappt



Schalten Sie das Gerät am grünen Knopf ein.



Sobald die Flasche gefüllt ist, zeigt es das Gerät an und schaltet ab.



Zum Abnehmen der O2-Flasche drücken Sie den Verriegelungsring nach unten und ziehen die Flasche nach oben ab.



Rauchen verboten
Offenes Feuer verboten

