

Kurzeinweisung Inogen One G3

PFLEGE

Wöchentlich Partikelfilter reinigen,
Gerät aus Tragetasche nehmen



Partikelfilter an der Vorderseite des
Gerätes entfernen



Filter mit Flüssigseife und Wasser
reinigen und trocknen lassen



Tragetasche speziell beim Partikelfilter
und Luftauslass regelmäßig reinigen,
z.B. kleiner Handstaubsauger



Oberflächen regelmäßig abwischen



Akku mit min. 60% Ladung entfernen,
falls Gerät länger als 7 Tage nicht
benutzt wird



Nutzungshinweise

Betrieb stets in aufrechter Position,
und nur in den zugelassenen Hüllen.
Temperatur zwischen 5°C bis 35°C



Keine feuchten Räume



Nicht vor einer Heizung



Lufteinlass- und Luftablass-Öffnungen
dürfen nicht blockiert sein



**Weitere wichtige Informationen finden Sie
in der Bedienungsanleitung**

pmt PIELMEIER
MEDIZINTECHNIK

Kurzeinweisung Inogen One G3

Was gehört alles zum Gerät?



O2-Konzentrator mit Akku und Tragetasche



230V-Steckernetzteil



KFZ-Ladekabel



Anleitung / Informationen



O2-Brille

Bitte lesen sie sich die Gebrauchsanleitung genau durch!

Vorbereitung

Laden Sie den Akku im Gerät mit dem 230V-Steckernetzteil voll auf (100%)

Hinweis: Das Gerät kann gleichzeitig geladen und benutzt werden



Laden Sie den Akku im Gerät mit dem KFZ-Ladekabel voll auf (100%)

Hinweis: Das Gerät kann gleichzeitig geladen und benutzt werden



Verbinden Sie eine O2-Brille mit dem Gerät

Hinweis: Maximale Länge der O2-Leitung 7,6m!



Inbetriebnahme

Einschalten




Ein akustisches Signal ertönt und alle Kontrollleuchten gehen an

Inhalieren



Setzen Sie die O2-Brille auf und atmen Sie am besten durch die Nase

Betrieb

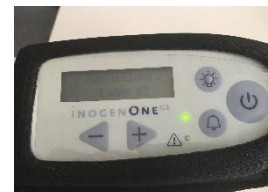

Die grüne LED blinkt = OK, Licht für Atmungserkennung

Einstellung 1



Mit den (- oder +)Tasten stellen Sie die Flussrate (Flow) ein (Stufe 1 bis 5)

Einstellung 2



Glocke = Taste für akustische Atemerkennungswarnung (Ein oder Aus)

Rauchen verboten
Offenes Feuer verboten

