

Befeuchterbecher Invacare Perfect O2



1x Befeuchterbecher mit Deckel



1x kurzer Verbindungsschlauch



1x Winkelanschluss
(montiert)

Montage

Stellen Sie den Befeuchterbecher in die vorgesehene Aussparung und befestigen Sie diesen mit dem Gummiband



Kurzen Verbindungsschlauch mit Gerät verbinden



Bechergewinde und Winkelstück verschrauben



O2-Brille oder Verlängerung am Seitenanschluss anstecken



Becher befüllen

Becher aus der Halterung nehmen
und Deckel abschrauben



Behälter bis zur Hälfte befüllen



Behälter wieder mit Deckel
verschrauben



Becher zurück in die Halterung stellen



TIPP:

- verwenden Sie entkalktes Wasser
- fassen Sie nicht in den Becher (Hygiene)
- im Schlauch zur Nase sollte kein Wasser sein (Hygiene)

Achtung !!!!!

Sollte kein Sauerstoff an der Nase ankommen

- Prüfen Sie bitte, ob der Becher richtig verschraubt ist
- Prüfen Sie bitte, ob der Bechcher bzw. der Perlator verkalkt ist
- Prüfen Sie bitte, ob die Schläuche richtig angeschlossen sind
- Prüfen Sie bitte, ob der Behälter beschädigt ist

PERLATOR



Behälter schief verschraubt



Behälter beschädigt



Weitere wichtige Informationen finden Sie
in der Bedienungsanleitung