

# Kurzeinweisung Respironics Everflo

## PFLEGE

Oberflächen regelmäßig abwischen



Rückseite



Rückdeckel abnehmen



Lamellen reinigen



Lufteinlass reinigen



Rückdeckel aufsetzen



## Aufstellung

Zentraler Aufstellort in der Wohnung



Keine feuchten Räume



**Nicht** vor einer Heizung



Ausreichend Abstand zur Wand  
mind. 15cm



**Weitere wichtige Informationen finden Sie  
in der Bedienungsanleitung**

**pmt** PIELMEIER  
MEDIZINTECHNIK

# Kurzeinweisung Respironics Everflo

Was gehört alles zum Gerät?



1x O2-Verlängerungsschlauch



4x O2-Brillen



1x Steckverbinder



Anleitung/ Informationen

Nur bei Bedarf



1x Befeuchterbecher

## Vorbereitung

Schritt 1

Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose (keine Mehrfachsteckdose)




Schritt 2

Verbinden Sie den Verlängerungsschlauch mit dem Gerät



Schritt 3

Verbinden Sie die Verlängerung und eine O2-Brille mit dem Steckverbinder

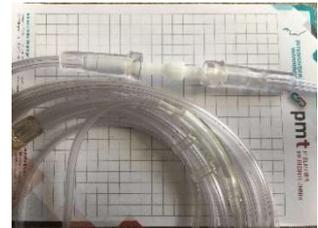

## Inbetriebnahme

Einschalten



Ein akustisches Signal ertönt und alle Kontrollleuchten gehen an

Betrieb



Die grüne LED zeigt an, dass das Gerät richtig funktioniert

Einstellung 1



Hier (am Flowmeter) stellen Sie die Flussrate ein

Einstellung 2



Die schwarze Kugel zeigt an, wieviel Sauerstoff aus dem Gerät kommt (Liter pro Minute)

Inhalieren



Setzen Sie die O2-Brille auf und atmen Sie am besten durch die Nase

Rauchen verboten  
Offenes Feuer verboten

